



COMMENT UTILISER DOCKY & MOOVY ?



1- J'APPAIRE (FLIP-FLOP)

Insérez et retirez 2 fois Moovy dans le logement du **Docky**.

2- JE PLACE

Fixez Moovy au bas du dos du résident suivant le protocole en vigueur.

3- JE DÉMARRE LA SURVEILLANCE

Quand le résident est allongé, **appuyez sur le bouton du Docky**, et respecter la temporisation de 10s avant de quitter la chambre.

4- UNE ALERTE ? J'INTERVIENS ET J'ACQUITTE



Acquittez l'intervention par un **appui long sur le bouton du Docky**. Revenez à l'étape 3.

BON À SAVOIR

- **Docky** vous indique la marche à suivre, consultez-le !
- **Moovy** est **étanche** et restera fonctionnel après une immersion accidentelle.
- **Moovy** peut être **désinfecté suivant les protocoles** habituels de la résidence.
- **Moovy** ne travaille pas seul... **Pensez à (ré)activer la surveillance !**



GUIDE DE DÉPANNAGE RAPIDE

- L'écran du **Docky** est noir : *appuyez sur son bouton pour le réveiller.*
- L'écran reste noir : *vérifiez qu'il soit bien branché sur le secteur.*
- **Moovy** ne se synchronise pas : *je vérifie le niveau de sa batterie sur l'écran du Docky ou sur l'app.*
- **Moovy** est déchargé : *je le réinsère dans le Docky pour qu'il se recharge et j'utilise le second Moovy.*

Si les problèmes subsistent, contactez votre responsable

